





ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Γενικές οδηγίες παροχής Πρώτων Βοηθειών	1τεμ
Αποστειρωμένα, κολλητικά επιθέματα σε 4 μεγέθη	20τεμ
Μη φαρμακευτικά, απορροφητικά οφθαλμικά κολλητικά επιθέματα	2τεμ
Τριγωνικοί επίδεσμοι	4τεμ
Αποστειρωμένοι ελαστικοί επίδεσμοι, 5εκ, 7.5εκ, 10εκ x 4.5μ, 3 τεμ/μέγεθος	9τεμ
Παραπάνες Ασφαλείας	6τεμ
Ψαλίδι	1τεμ
Αποστειρωμένες μη φαρμακευτικές γάζες πληγών 10 X 10εκ.	6τεμ
Αποστειρωμένες μη φαρμακευτικές γάζες πληγών 10 X 15εκ.	2τεμ
Υγρά αντισηπτικά μαντηλάκια	8τεμ
Αποστειρωμένα γάντια	2ζεύγ.
Αποστειρωμένο οφθαλμικό ξέπλυμα (0,9%)	2τεμ

ΓΙΑ 20 ΑΤΟΜΑ / FOR 20 PERSONS



CONTENTS

General First Aid Instructions	1pc
Adhesive sterile bandages in 4 sizes	20pcs
Non-pharmaceutical, ophthalmic absorbent adhesive pads	2pcs
Triangular bandages	4pcs
Sterile elastic bandages, 5cm, 7.5cm, 10cm wide x 4.5m long, 3pcs each size	9pcs
Safety pins	6pcs
Scissor	1pc
Sterile non-medical wound patches 10 x 10cm	6pcs
Sterile non-pharmaceutical wound patches size 10x15 cm	2pcs
Liquid antiseptic wipes	8pcs
Disposable sterile vinyl gloves	2pairs
Antiseptic liquid eye rinse (0,9%)	2pcs

patriotis

EXP: 06/2027

AQUARIUS
SAFETY PRODUCTS



542913831006740



Made in PRC

Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και χρήση ΑΕΑ Cardiopulmonary resuscitation and AED

- 

1
Αν με ακούς άνοιξε τα μάτια σου
Open your eyes
Εκτιμήστε - ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Asses situation - DANGER.
- 

2
Ελέγξτε την ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
Check for RESPONSE
- 

3
Αν δεν ανταποκρίνεται, φωνάξτε ΒΟΗΘΕΙΑ
If no response SHOUT FOR HELP
ΒΟΗΘΕΙΑ!
HELP!
- 

4
Ανοίξτε τον ΑΕΡΑΓΩΓΟ
Open the AIRWAY
- 

5
Ελέγξτε την ΑΝΑΠΝΟΗ
Check for BREATHING
- 

6
Αν δεν αναπνέει καλέστε 112
Αν υπάρχει ζητήστε τον απινιδωτή
If non breathing call 112
If available, ask for defibrillator
- 

7
Τοποθετήστε τον καρπό της παλάμης στο στήθος
Place heel of hand on sternum centre
- 

8
Εφαρμόστε 30 θωρακικές συμπίεσεις με ρυθμό 100-120 το λεπτό, σε βάθος 5-6 εκ. ή κατά το 1/3 του θώρακα



Προσφέρει 2 αναπνοές διάσωσης
διάρκειας 1 δευτ. τουλάχιστον ή κάθε μια.
Συνεχίστε με ρυθμό 30:2 ...
Perform 2 rescue breaths, each 1 sec at least
Continue with 30:2 ...



Εφαρμόστε τα ηλεκτρόδια του AED στον θώρακα
και ακολουθήστε τις φωνητικές οδηγίες του.
Stick pads to chest, switch on AED's
and follow AED's instructions.

Do 30 compressions at 100-120/min
5-6cm (on adult) or at 1/3 of chest

Σταματούμε όταν:
We stop when:

1. ο πάσχοντας αναnehφει
patient recovers
2. μας αντικαταστήσουν
we are replaced
3. φτάσει το ασθενοφόρο
ambulance arrive
4. εξαντληθούμε
we get exhausted

ΘΕΣΗ ΑΝΑΝΗΨΗΣ

Όταν ο πάσχοντας αναnehφει
τοποθετήστε τον σε θέση ανάνηψης.
Αξιολογείτε συνεχώς.
Παραμένετε κοντά του.
When patient recovers
place him in recovery position.
Keep assessing him. Stay with him.



Tel: 99672251, Fax: 25714101, dolierouds@cvtanet.com.cy



